

LEPEX-NOVUM Istruzioni per l'uso



LEPEX-NOVUM

LEPEX-NOVUM è un diluente di colore arancione che può essere utilizzato con lo sperma di coniglio per favorire l'ovulazione e la gravidanza. La sua azione si basa sulla protezione dei componenti dello sperma di coniglio che inducono naturalmente l'ovulazione. Di conseguenza, non è richiesta la registrazione come medicinale veterinario.

Confezione

LEPEX-NOVUM in polvere è confezionato in flaconi/tubetti per la preparazione di 1000 ml, 500 ml o 250 ml di diluente per sperma di coniglio. A seconda del volume di diluente richiesto, il contenuto di un flacone/tubetto può essere utilizzato in tutto o in parte. Altre confezioni sono disponibili su richiesta.

Istruzioni per la conservazione

LEPEX-NOVUM viene spedito refrigerato. Al ricevimento, deve essere immediatamente conservato a -20 °C. Se conservato correttamente, il prodotto rimane stabile per **almeno un anno**.

Istruzioni per l'uso

Prima di preparare l'estensore LEPEX-NOVUM, la polvere deve essere portata a **temperatura ambiente**. Il flacone/tubetto può essere tolto dal congelatore il giorno prima dell'uso o il giorno stesso dell'uso. Per accelerare il processo di riscaldamento, è possibile rotolare il flacone tra le mani.

Il dosaggio raccomandato è **indicato sul flacone/tubo, etichettato LEPEX-NOVUM**. Quando si aggiunge la polvere, ridurre al minimo la formazione di polvere ed evitare l'inalazione utilizzando misure di protezione adeguate, come una **maschera** o lavorando in una **cabina a flusso d'aria**. Non dimenticare di sciacquare il flacone/tubo che conteneva la polvere. Mescolare lentamente la miscela per evitare la formazione di grumi. La polvere è facilmente solubile nel mezzo utilizzato per diluire lo sperma di coniglio.

Per garantire risultati ottimali, il tempo che intercorre tra la preparazione dell'estensore LEPEX-NOVUM e l'inseminazione deve essere il più breve possibile. **L'intervallo massimo raccomandato è di 24 ore**. L'estensore LEPEX-NOVUM può essere conservato in **frigorifero per un massimo di 3 giorni**. A seconda del tipo di estensore utilizzato, è possibile una conservazione più lunga senza perdita di prestazioni. In alternativa, LEPEX-NOVUM può essere **congelato**, ma anche in questo caso la stabilità dipenderà dalla formulazione dell'estensore.