

LEPEX-NOVUM Instrucciones de uso



LEPEX-NOVUM

LEPEX-NOVUM es un diluyente de color naranja que se utiliza para proteger los componentes del semen natural de conejo. Su formulación contiene hidrolizados proteicos seleccionados y componentes protectores destinados a reducir la degradación de las proteínas y péptidos sensibles presentes en el semen durante su almacenamiento. El suplemento NOVUM tiene como objetivo preservar en mayor medida las características biológicas del semen fresco. El objetivo es claro: proporcionar, en el momento de la inseminación, un semen que se asemeje lo más posible a la calidad biológica que tenía en el momento de su recogida. Por lo tanto, no es necesario registrarlo como medicamento veterinario.

Envase

El polvo LEPEX-NOVUM se presenta en frascos/tubos para preparar 1000 ml, 500 ml, 250 ml o 150 ml de diluyente de semen de conejo. Dependiendo del volumen de diluyente necesario, el contenido de un frasco/tubo se puede utilizar en su totalidad o en parte. Hay otros tamaños de envase disponibles bajo pedido.

Instrucciones de almacenamiento

LEPEX-NOVUM se envía refrigerado. Una vez recibido, debe almacenarse inmediatamente a **-20 °C**. Si se almacena correctamente, el producto se mantiene estable durante **al menos un año**.

Instrucciones de uso

Antes de preparar el extensor LEPEX-NOVUM, el polvo debe alcanzar **la temperatura ambiente**. El frasco o tubo puede sacarse del congelador el día anterior a su uso o el mismo día. Para acelerar el proceso de calentamiento, puede hacer rodar el frasco entre las manos.

La dosis recomendada está **indicada en el frasco/tubo, etiquetado como LEPEX-NOVUM**. Al añadir el polvo, minimice la formación de polvo y evite su inhalación utilizando medidas de protección adecuadas, como una **mascarilla** o trabajando en una **cabina de flujo**. No olvide enjuagar el frasco/tubo que contenía el polvo. Remueva la mezcla lentamente para evitar la formación de grumos. El polvo se disuelve fácilmente en agua desmineralizada tibia. (No olvide enjuagar el tubo o frasco original).

Para garantizar unos resultados óptimos, el tiempo entre la preparación del diluyente LEPEX-NOVUM y la inseminación debe ser lo más breve posible. El **intervalo máximo recomendado** es de **24 horas**. El diluyente LEPEX-NOVUM puede conservarse en el **frigorífico hasta 3 días**. Es posible un almacenamiento más prolongado sin pérdida de rendimiento, dependiendo del tipo de diluyente utilizado. Alternativamente, LEPEX-NOVUM puede **congelarse**, pero, de nuevo, la estabilidad dependerá de la formulación del diluyente.