

LEPEX-NOVUM használati utasítás



LEPEX-NOVUM

A **LEPEX-NOVUM** egy narancsszínű hígítószer, amelyet a természetes nyúl sperma összetevőinek védelmére használnak. Összetételében kiválasztott fehérjehidrolizátumok és védőanyagok találhatók, amelyek célja, hogy csökkentsék a sperma érzékeny fehérjéinek és peptidjeinek lebomlását tárolás közben. A NOVUM kiegészítő célja, hogy a friss sperma biológiai tulajdonságait nagyobb mértékben megőrizze. A cél egyértelmű: olyan sperma biztosítása a megtermékenyítés során, amely minél jobban hasonlít a sperma gyűjtéskori biológiai minőségéhez. Ennek eredményeként állatgyógyászati készítményként való regisztrációja nem szükséges.

Csomagolás

A LEPEX-NOVUM por 1000 ml, 500 ml vagy 250 ml nyúl sperma hígító elkészítéséhez alkalmas palackokban/tubusokban kerül forgalomba. A szükséges hígító mennyiségétől függően a palack/tubus tartalma teljes egészében vagy részben felhasználható. Egyéb csomagolási méretek kérésre rendelkezésre állnak.

Tárolási utasítás

A LEPEX-NOVUM hűtve kerül szállításra. Átvétel után azonnal **-20 °C**-on kell tárolni. Megfelelő tárolás mellett a termék **legalább egy évig** stabil marad.

Használati utasítás

A LEPEX-NOVUM extender elkészítése előtt a port **szobahőmérsékletre** kell hozni. A palackot/tubust a felhasználás előtti napon vagy a felhasználás napján lehet kivinni a fagyasztóból. A felmelegedés gyorsításához a palackot a kezek között meg lehet forgatni.

Az ajánlott adagolás a **LEPEX-NOVUM feliratú palackon/tubuson szerepel**. A por hozzáadásakor minimalizálja a por képződését és kerülje a belélegzést megfelelő védőintézkedésekkel, például **maszk** viselésével vagy **áramlásos szekrényben való** munkavégzéssel. Ne felejtse el kiöblíteni a port tartalmazó palackot/tubust. A keveréket lassan keverje, hogy ne keletkezzenek csomók. A por könnyen oldódik langyos, ásványmentesített vízben.

Az optimális eredmény elérése érdekében a LEPEX-NOVUM hígító elkészítése és a megtermékenyítés között a lehető legrövidebb idő teljen el. A **maximális ajánlott időtartam 24 óra**. A LEPEX-NOVUM hígító **hűtőszekrényben legfeljebb 3 napig** tárolható. A teljesítmény romlása nélkül hosszabb tárolás is lehetséges, a használt hígító típusától függően. Alternatív megoldásként a LEPEX-NOVUM **fagyasztható**, de a stabilitás itt is a hígító összetételétől függ.