

LEPEX-NOVUM Istruzioni per l'uso



LEPEX-NOVUM

LEPEX-NOVUM è un diluente di colore arancione utilizzato per proteggere i componenti dello sperma naturale di coniglio. La sua formulazione contiene idrolizzati proteici selezionati e componenti protettivi volti a ridurre la degradazione delle proteine e dei peptidi sensibili presenti nello sperma durante la conservazione. L'integratore NOVUM ha lo scopo di preservare in misura maggiore le caratteristiche biologiche dello sperma fresco. L'obiettivo è chiaro: fornire, al momento dell'inseminazione, uno sperma che rispecchi il più possibile la qualità biologica dello sperma al momento del prelievo. Di conseguenza, non è richiesta la registrazione come medicinale veterinario.

Confezione

LEPEX-NOVUM in polvere è confezionato in flaconi/tubetti per la preparazione di 1000 ml, 500 ml o 250 ml di diluente per sperma di coniglio. A seconda del volume di diluente richiesto, il contenuto di un flacone/tubetto può essere utilizzato in tutto o in parte. Altre confezioni sono disponibili su richiesta.

Istruzioni per la conservazione

LEPEX-NOVUM viene spedito refrigerato. Al ricevimento, deve essere immediatamente conservato a -20 °C. Se conservato correttamente, il prodotto rimane stabile per **almeno un anno**.

Istruzioni per l'uso

Prima di preparare l'estensore LEPEX-NOVUM, la polvere deve essere portata a **temperatura ambiente**. Il flacone/tubetto può essere tolto dal congelatore il giorno prima dell'uso o il giorno stesso dell'uso. Per accelerare il processo di riscaldamento, è possibile rotolare il flacone tra le mani.

Il dosaggio raccomandato è **indicato sul flacone/tubo, etichettato LEPEX-NOVUM**. Quando si aggiunge la polvere, ridurre al minimo la formazione di polvere ed evitare l'inalazione utilizzando misure di protezione adeguate, come una **maschera** o lavorando in una **cabina a flusso d'aria**. Non dimenticare di sciacquare il flacone/tubo che conteneva la polvere. Mescolare lentamente la miscela per evitare la formazione di grumi. La polvere si scioglie facilmente in acqua demineralizzata tiepida.

Per garantire risultati ottimali, il tempo che intercorre tra la preparazione dell'estensore LEPEX-NOVUM e l'inseminazione deve essere il più breve possibile. **L'intervallo massimo raccomandato è di 24 ore**. L'estensore LEPEX-NOVUM può essere conservato in **frigorifero per un massimo di 3 giorni**. A seconda del tipo di estensore utilizzato, è possibile una conservazione più lunga senza perdita di prestazioni. In alternativa, LEPEX-NOVUM può essere **congelato**, ma anche in questo caso la stabilità dipenderà dalla formulazione dell'estensore.