

NOVUM Instrukcja obsługi

NOVUM

NOVUM to proszek o pomarańczowym kolorze, który można dodawać jako suplement do rozcieńczalników nasienia królików. Służy on do ochrony składników naturalnego nasienia królików. Jego skład zawiera wyselekcjonowane hydrolizaty białkowe oraz składniki ochronne, których zadaniem jest ograniczenie rozkładu wrażliwych białek i peptydów w nasieniu podczas przechowywania. Suplement NOVUM ma na celu zachowanie większej części właściwości biologicznych świeżego nasienia. Cel jest prosty: dostarczenie podczas inseminacji nasienia, które bardziej przypomina jakość biologiczną nasienia w momencie jego pobrania. W związku z tym nie jest wymagana rejestracja jako lek weterynaryjny.

Opakowanie

Proszek Novum jest pakowany w plastikowe butelki, z których każda zawiera **2,4 grama**. Ilość ta jest odpowiednia do zmieszania z **500 ml** rozcieńczalnika nasienia królików. W zależności od wymaganej objętości rozcieńczalnika, zawartość butelki można wykorzystać w całości lub w części. Na życzenie dostępne są inne rozmiary opakowań. (na przykład: 0,24 g do przygotowania 50 ml rozcieńczalnika)

Instrukcje dotyczące przechowywania

NOVUM jest wysyłany w stanie schłodzonym. Po otrzymaniu należy go natychmiast przechowywać w temperaturze **-20°C**. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt zachowuje stabilność przez **co najmniej rok**.

Instrukcja stosowania

Przed dodaniem NOVUM do rozcieńczalnika proszek należy doprowadzić do **temperatury pokojowej**. Butelkę można wyjąć z zamrażarki dzień przed użyciem lub w dniu użycia. Aby przyspieszyć proces ogrzewania, można rozgrzać butelkę, obracając ją w dłoniach. Zalecana dawka to **2,4 grama proszku na 500 ml rozcieńczalnika** (lub 0,24 grama na 50 ml). Podczas dodawania proszku należy zminimalizować tworzenie się pyłu i unikać wdychania, stosując odpowiednie środki ochronne, takie jak **maska** lub pracując w **komorze przepływowej**. Mieszanke należy powoli mieszać, aby zapobiec tworzeniu się grudek. Proszek łatwo rozpuszcza się w pożywce używanej do rozcieńczania nasienia królika i jest kompatybilny z każdym **dostępnym w handlu rozcieńczalnikiem**. (Nie zapomnij przepłukać oryginalnej tubki/butelki).

Aby zapewnić optymalne wyniki, czas między dodaniem NOVUM do rozcieńczalnika a inseminacją powinien być jak najkrótszy. **Maksymalny zalecany odstęp czasu** wynosi **24 godziny**.

Rozcieńczalnik zawierający NOVUM można przechowywać w **lodówce do 3 dni**. W zależności od rodzaju użytego rozcieńczalnika możliwe jest dłuższe przechowywanie bez utraty właściwości. Alternatywnie rozcieńczalnik z NOVUM można **zamrozić**, ale stabilność będzie zależała od składu rozcieńczalnika.